

血沉测定试剂盒说明书(精简版)

(货号: C038-1-1 Westergren 氏法 250T)

免责声明:测试前请仔细阅读说明书,预试后再进行批量实验,否则由此导致的后果用户自行承担!

一、试剂组成:

血沉稀释液 100mL×1 瓶

二、操作过程:

- 1、于小试管内加血沉稀释液 0.4mL。
- 2、静脉取血 1.6mL, 注入上述试管内, 立即充分混匀。
- 3、用魏(Westergren)氏血沉管吸上述混匀液至"0"刻度处,拭去管尖处附着的血,直立于血沉架上,不得倾斜,亦不得混入气泡。
- **4、**在室温(18℃ \sim 25°C)下静置一小时整,观察红细胞沉降的 mm 数。结果以红细胞沉降率 mm/h 报告。

三、正常参考值:

男 0~15mm/h

女 0~20mm/h

公司地址:南京市玄武区中央路 258-27 号新立基大厦 邮政编码: 210009 E-Mail: njjcbio@vip.163.com

联系电话: 025-83360321、83360969、83551389 技术支持: 025-83360272、19951670086